




医療機器向け清拭クロス
Toraysee® for CE

チェア/環境表面用除菌クロス
マイクロジッド センシティブ ワイプス



パキューム回路洗浄剤
マザックP

歯科用ユニット パキューム・排水管路洗浄剤
マザック リキッド

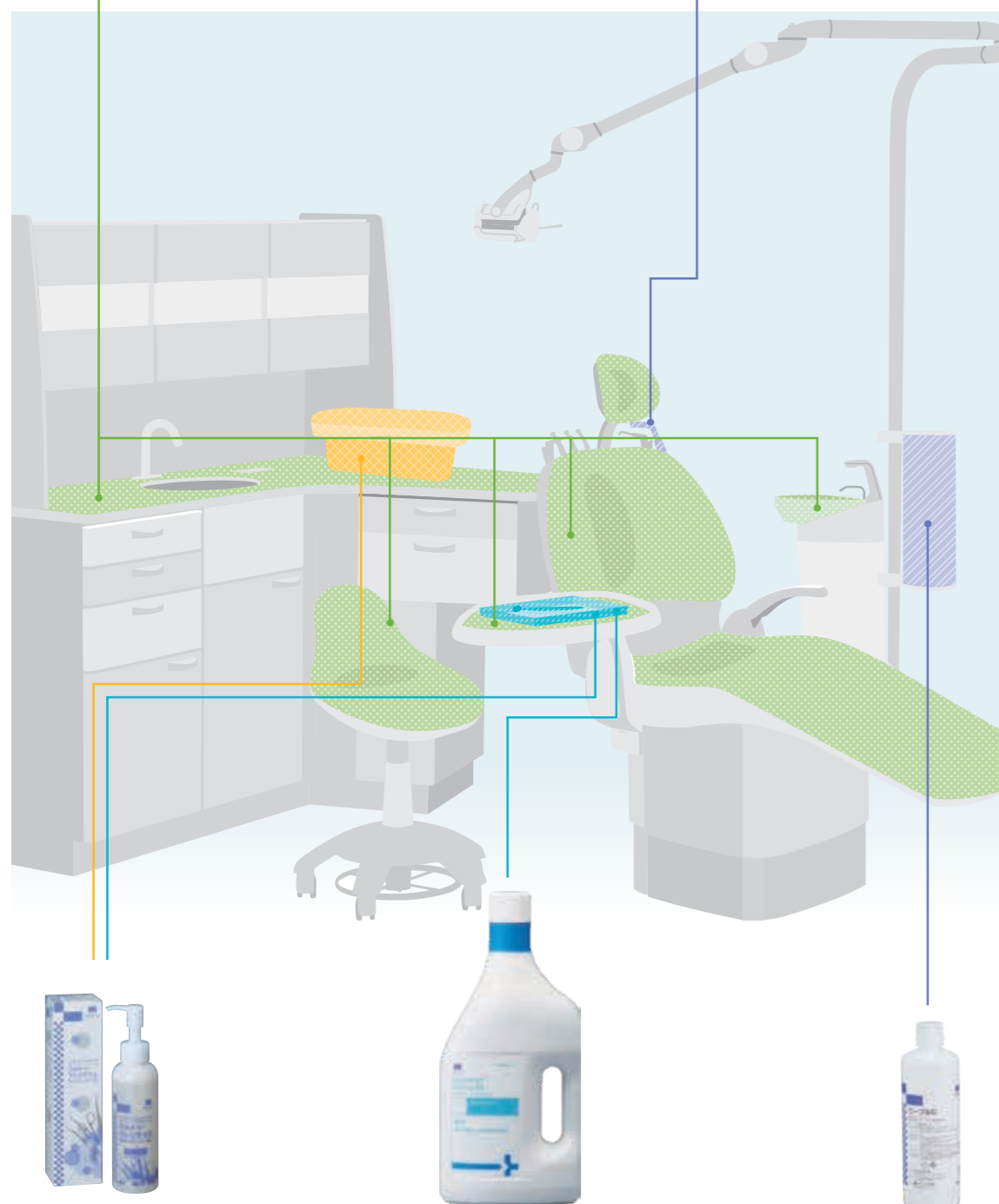

酵素系洗浄剤
ウルトラ・フレンザイム

器具(小器具)用防錆/除菌/洗浄剤
ギガセプト インスツルAF

チェア給水管路クリーンシステム専用洗浄液
ワープルC

酵素系洗浄剤
ウルトラ・フレンザイム

主成分	プロテアーゼ、リパーゼ、非イオン系界面活性剤、熊笹エキス
内容量	150mL
用途	器具、印象体、衣類の洗浄
製造	株式会社葺化デンタル
標準価格	
ウルトラ・フレンザイム 150mL	6,400円 202600101
ウルトラ・フレンザイム泡洗浄ボトル	1,240円 202600102

器具(小器具)用防錆/除菌/洗浄剤
ギガセプト インスツルAF

主成分	コソアルキルプロピレンジアミンジアミンジ酢酸塩、フェノキシプロパノール/塩化ベンザルコニウム、防錆剤、非イオン界面活性剤
内容量	2000mL
用途	器具(各種インスツルメント、外科用器具、パー類など)の除菌、洗浄。 ※一部のゴム製品への使用では変色のおそれがあります。
発売	schülke → シュルケ・ジャパン合同会社
標準価格	10,370円 202600302

パキューム回路洗浄剤
マザックP

用途	パキューム配管、タンク内、ベース排水回路の洗浄
包装	(マザックP スターターパック) 粉材1kg(33回分)、330mLピーカー、計量スプーン、攪拌棒 (マザックP リピーターズパック)粉材1kg×3袋(99回分)
標準価格	
マザックP スターターパック	2,220円 201070880
マザックP リピーターズパック	5,130円 201070881
発売	株式会社ジェイエムエンジニアリング

チェア給水管路クリーンシステム専用洗浄液
ワープルC

用途	チェア給水管路の洗浄 ※モリタの給水管路クリーンシステム搭載チェアのみお使いいただけます。
標準価格	
450mL×3本	4,200円 201070885
発売	株式会社モリタ製作所

チェア/環境表面用除菌クロス
マイクロジッド センシティブ ワイプス

主成分	ジアルキルメチル塩化アンモニウム、 n-アルキルジメチル塩化アンモニウムベンザルコニウム、 n-アルキルジメチルエチル塩化アンモニウムベンザルコニウム
内容量	200枚
用途	医療機器、キャビネット表面の除菌、清掃 ※一部の金属、ゴム、樹脂への使用では、影響が出る可能性があります。 ※機器への使用につきましては、各製造メーカーの取り扱い説明書をご確認ください。
発売	schülke → シュルケ・ジャパン合同会社
標準価格	5,080円 202600300

医療機器向け清拭クロス
Toraysee® for CE

内容量	10枚/箱(1枚ずつ個別)
用途	医療機器の清拭に特化したマイクロファイバークロス
製造	東レ・メディカル株式会社
製造元	東レ株式会社
標準価格	3,600円 202600303

歯科用ユニット パキューム・排水管路洗浄剤
マザック リキッド

用途	パキューム配管、タンク内、ベース排水回路の洗浄
標準価格	
マザック リキッド600mL	2,200円 201070892
マザック リキッド4000mL	13,400円 201070893
発売	株式会社ジェイエムエンジニアリング

●標準価格の後の数字は品目コードです。●掲載商品の標準価格は、2023年2月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。
●仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の取扱説明書を必ずお読みください。●商品の取り扱い状況に関してはお問合せください。

発売 **株式会社モリタ**
 大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06.6380.2525
 東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03.3836.6161
 お問合せ お客様相談センター T 0800.332.8020(フリーコール)
 <歯科医療従事者様専用> www.dental-plaza.com

M1669.9.2303.1.000H.YJ/D/DC 208510638

モリタ 除菌/洗浄システム
 用途別に除菌、洗浄剤をラインナップ。
 クリーン&セーフティな診療空間づくりに。

Thinking ahead. Focused on life.

院内感染予防対策における除菌と洗浄を より分かりやすく、より効果的に。 〈モリタ 除菌/洗浄システム〉

感染リスクの程度および対象物に応じた院内感染予防対策を行うことが大切です。

安全性も高く、環境への負荷も少ない除菌/洗浄剤をセレクトしました。

少ない品目で器具、印象体、チェアおよび環境表面の除菌、洗浄が行えます。



酵素系洗浄剤 ウルトラ・クレンザイム

特殊ブレンド酵素成分が器具、印象体、衣類に付いたタンパク汚れや脂質を強力分解。
中性の防錆剤配合酵素系洗浄剤なので器具を傷めません。
50～500倍に希釈して使用するので経済的。



ウルトラ・クレンザイムによる器具の洗浄
左: 泡洗浄 (約3分) の場合
右: 浸漬法 (約10分) もしくは超音波洗浄法 (約5分) の場合



ウルトラ・クレンザイムによる
印象体の泡洗浄 (約3分)

防錆剤配合		
作用時間	泡	約3分
	浸漬	約10分
	超音波	約5分
希釈	泡	50倍
	浸漬、超音波	500倍

希釈例	
<50倍 (泡洗浄)> 専用泡ボトル一杯の水 (200mL) に原液4プッシュ (4mL) を入れ希釈	
<500倍 (浸漬、超音波洗浄)> 水2L に対し原液4プッシュ (4mL) を入れ希釈	



器具 (小器具) 用防錆/除菌/洗浄剤 ギガセプト インスツルAF

洗浄効果もあり、超音波洗浄器との併用も可能な除菌/洗浄剤。
防錆剤配合除菌/洗浄剤なので器具を傷めません。
33倍に希釈して使用するので経済的。



ギガセプト インスツルAFによる器具の除菌
(浸漬法 (約15分) もしくは超音波洗浄法 (約5分))

希釈例	
<33倍>	水2L に対し付属の計量キャップ3杯 (約60mL) の原液を希釈


アルデヒドフリー 防錆剤配合		
作用時間	浸漬	約15分
	超音波	約5分
希釈		33倍
EN (欧州規格) 試験準拠		

計量キャップ付



チェア給水管路クリーンシステム専用洗浄液 ワープルC

希釈した過酸化水素水により、チェア給水管路内を洗浄。

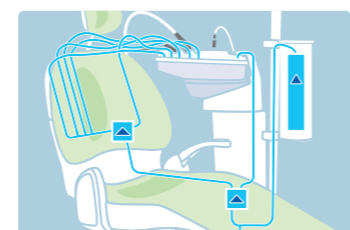


診療後、残留水をフラッシング装置より排出する際、30倍に希釈した専用液を給水管路に供給し、夜間・休日の給水管路をクリーンに保つ。診療開始時には洗浄液を排出。

希釈	
	30倍



チェア/環境表面用除菌クロス マイクロジッド センシティブ ワイプス

清掃と除菌が一度にできるクロス。
アルコールフリーなので血液も直接拭き取ることができます。

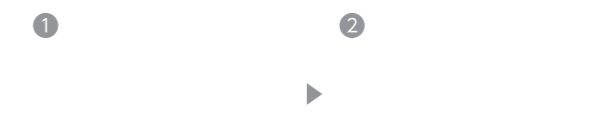

マイクロジッドセンシティブワイプスでの清拭後、
約1分間放置

清潔な布による液剤の拭き取り
(デンタルタオルNを使用)



医療機器向け清拭クロス Toraysee® for CE

医療機器の清拭に特化したマイクロファイバークロス。
患者さんの肌に触れやすく、消毒を頻回にできない器材に付着した汚れに対し高い除去性能で清潔な診療環境の維持をサポートします。
<使用例>




ユニット

ホース



バキューム回路洗浄剤 マザックP

バキューム配管、ベースン排水回路、タンク内をスピード洗浄。
過炭酸ナトリウム中の酸素により汚れを強力に除去。

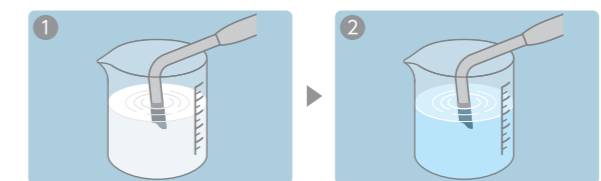

チェア1台につき、マザックP希釈液
300mLを吸引後、約5分間放置

水300mLを吸引

希釈例	
<10倍>	水300mL に対し計量スプーン8分目 (約30g) のパウダーを希釈


※写真はマザックP スターターパック

作用時間	
	約5分
希釈	10倍



歯科用ユニット バキューム・排水管路洗浄剤 マザック リキッド

溶解する手間が省ける液体タイプの洗浄剤。
雑菌に由来する付着汚れや有機物などの堆積汚れを分解・除去。
毎日の洗浄を習慣化していただくことで管路内をクリーンに保ちます。

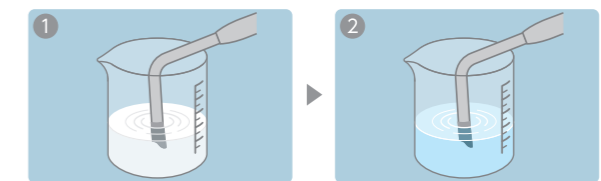

チェア1台につき、マザックリキッド希釈液
100～200mLを吸引し、翌朝まで静置。

診療前に水100～200mLを吸引。

希釈例	
<100倍>	水100mL に対し1mLの原液を希釈

作用時間	
	一晩
希釈	100倍