





ハロゲンランプを長持ちさせるため、以下の点についてご確認ください。

< 設置 >  
 直射日光が当たる場所、暖房器具の吹き出し付近など熱がこもる場所に設置していませんか？  
 不安定な場所、傾いた場所に設置していませんか？  
 キャビネット内など密閉された場所に設置していませんか？

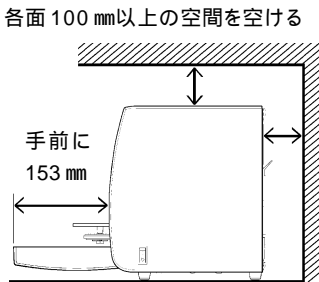


< 操作中 >  
 照射中または消灯直後、本体に衝撃を与えていませんか？  
 照射中に本体背面の冷却ファンが回転していますか？


×扉を乱暴に開けない




< スイッチ操作 >  
 使用後はメインスイッチを必ずOFFにしていますか？

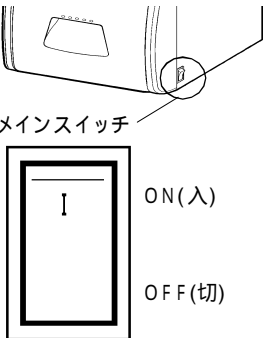

照射中または消灯直後にメインスイッチをいきなりOFFしていませんか？

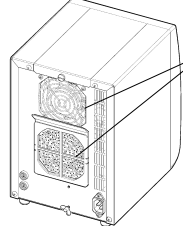

スタート/ストップの操作を著しく繰り返していませんか？




START/STOP キー




ハロゲンランプを長持ちさせるため、以下の点についてご確認ください。

< 設置 >  
 直射日光が当たる場所、暖房器具の吹き出し付近など熱がこもる場所に設置していませんか？  
 不安定な場所、傾いた場所に設置していませんか？  
 キャビネット内など密閉された場所に設置していませんか？

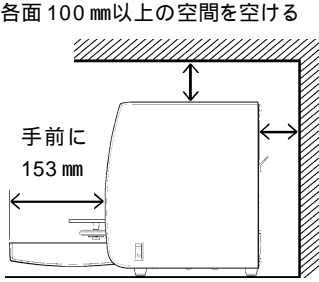


< 操作中 >  
 照射中または消灯直後、本体に衝撃を与えていませんか？  
 照射中に本体背面の冷却ファンが回転していますか？


×扉を乱暴に開けない




< スイッチ操作 >  
 使用後はメインスイッチを必ずOFFにしていますか？

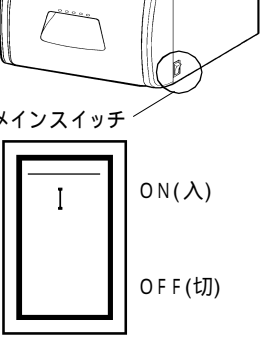

照射中または消灯直後にメインスイッチをいきなりOFFしていませんか？

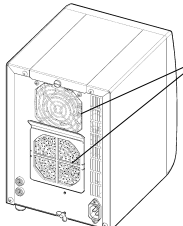


スタート/ストップの操作を著しく繰り返していませんか？



START/STOP キー


<エアークフィルタ>

フィルタケースは確実に  
取り付けていますか？

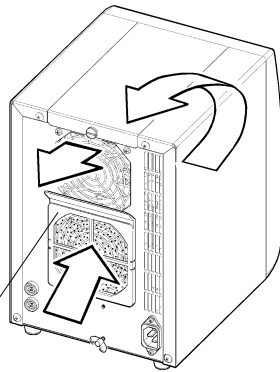


フィルタケースにより  
熱気の再吸収を防ぐ

エアークフィルタが目詰まり  
していませんか？

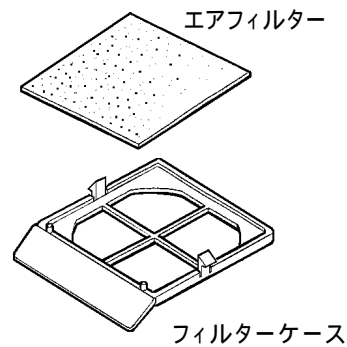

<ハロゲンランプ>


LIGHT 専用ランプ以外のランプ  
(規格外品や他機種  
のランプなど) を  
使用していませんか？

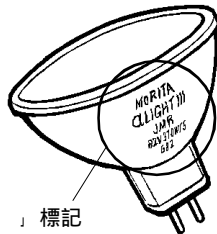

「LIGHT」標記

ランプ交換の際、リフレクター表面  
に油分などの汚れが付着して  
いませんか？

(触れてしまった場合はアルコールを  
含ませたガーゼで拭き取る  
こと)

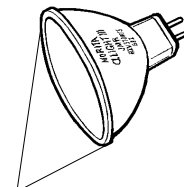

ランプをつかむ時は  
縁を持って

入力電圧 (コンセント) に関して


ご使用の地域・施設などの諸条件により、室内の電圧に差異が生じる場合があります。上記確認を実施しても改善されない場合は電圧による影響も考えられますので、ご購入店もしくは最寄りのモリタまでご相談下さい。

上記確認項目に関連する詳細は、ご使用の機種に添付の取扱説明書を合わせて参照下さい。

2/2


<エアークフィルタ>

フィルタケースは確実に  
取り付けていますか？

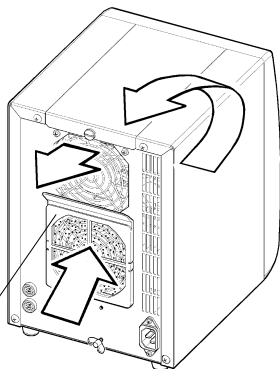


フィルタケースにより  
熱気の再吸収を防ぐ

エアークフィルタが目詰まり  
していませんか？

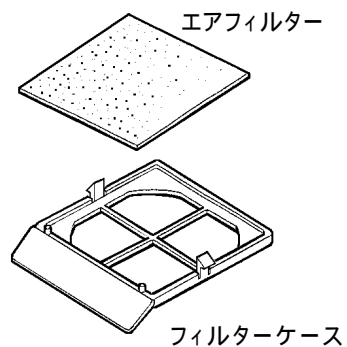

<ハロゲンランプ>


LIGHT 専用ランプ以外のランプ  
(規格外品や他機種  
のランプなど) を  
使用していませんか？

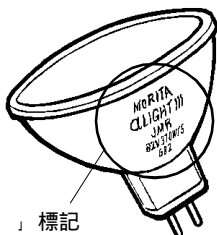

「LIGHT」標記

ランプ交換の際、リフレクター表面  
に油分などの汚れが付着して  
いませんか？

(触れてしまった場合はアルコールを  
含ませたガーゼで拭き取る  
こと)

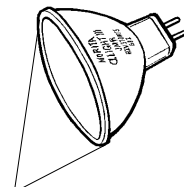

ランプをつかむ時は  
縁を持って

入力電圧 (コンセント) に関して

ご使用の地域・施設などの諸条件により、室内の電圧に差異が生じる場合があります。上記確認を実施しても改善されない場合は電圧による影響も考えられますので、ご購入店もしくは最寄りのモリタまでご相談下さい。

上記確認項目に関連する詳細は、ご使用の機種に添付の取扱説明書を合わせて参照下さい。

2/2